


Установка и настройка приложения Lumiflex LinX

Пошаговая инструкция

Установка приложения на смартфон



Перед установкой сенсора нужно загрузить приложение Lumiflex Linx на смартфон.

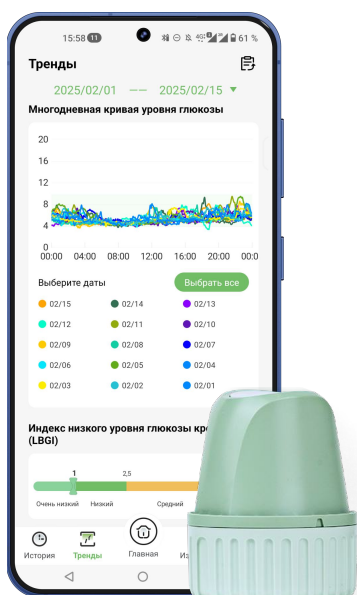

Где скачать приложение?

- Google Play.
- App Store.
- Сайт.

Если ваш телефон на Android имеет ограниченный доступ к Google Play и не находит приложение Lumiflex LinX, перейдите на сайт [люмифлекс.рф](https://lumiflex.rf) в раздел «Приложения» и скачайте APK-файл.

APK-файл для Android

[Прямая ссылка на скачивание](#)




Пользователи без доступа к российскому App Store могут установить приложение через TestFlight.

[Инструкция по установке и регистрации в приложении Lumiflex LinX на iOS \(через TestFlight\)](#)

Инструкция по настройке приложения

1. Откройте приложение и нажмите кнопку **«Регистрация»**.
2. Введите свой номер телефона, затем нажмите **«Получить код»**.
Введите код из СМС. Придумайте пароль из 8–16 латинских букв и/или цифр. Согласитесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Нажмите кнопку **«Регистрация»**.

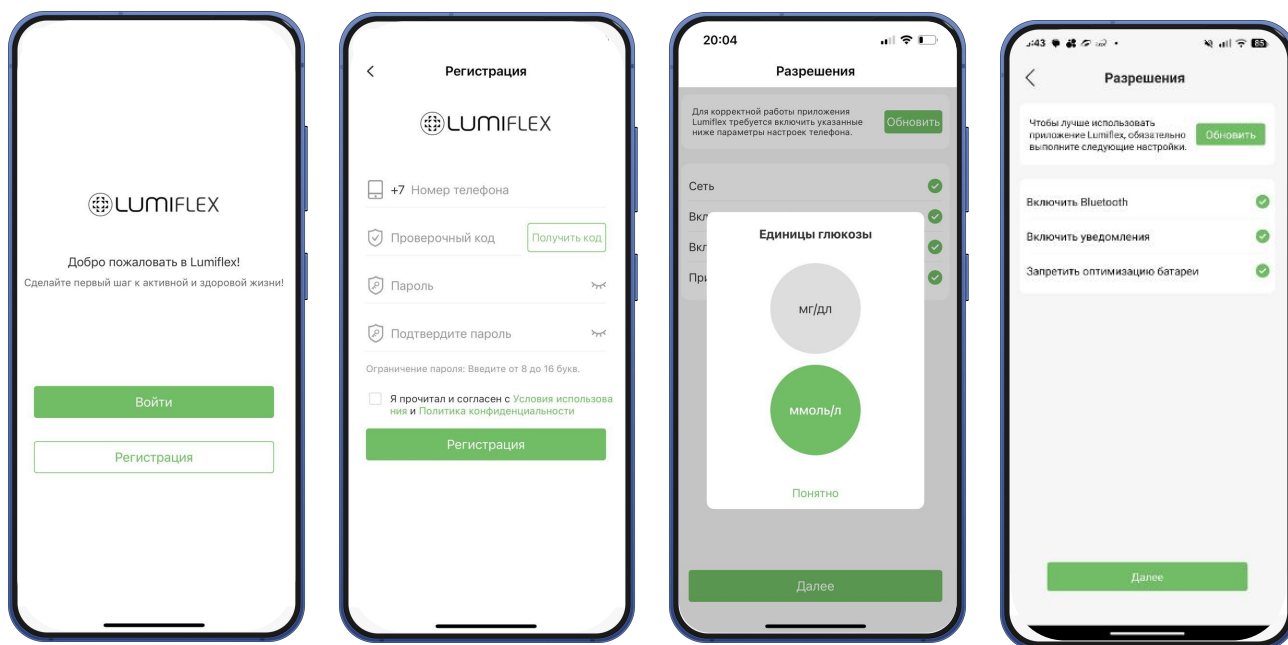


3. Убедитесь, что зеленым цветом подсвечивается круг со значением ммоль/л. Нажмите **«Понятно»**.
4. Предоставьте все запрашиваемые разрешения (должны появиться зеленые галочки).



Обратите внимание! Для регистрации в приложении используйте только **русский номер** мобильного телефона.

Инструкция по настройке приложения

5. На следующих экранах ознакомьтесь с информацией и нажмите **«Далее»**.

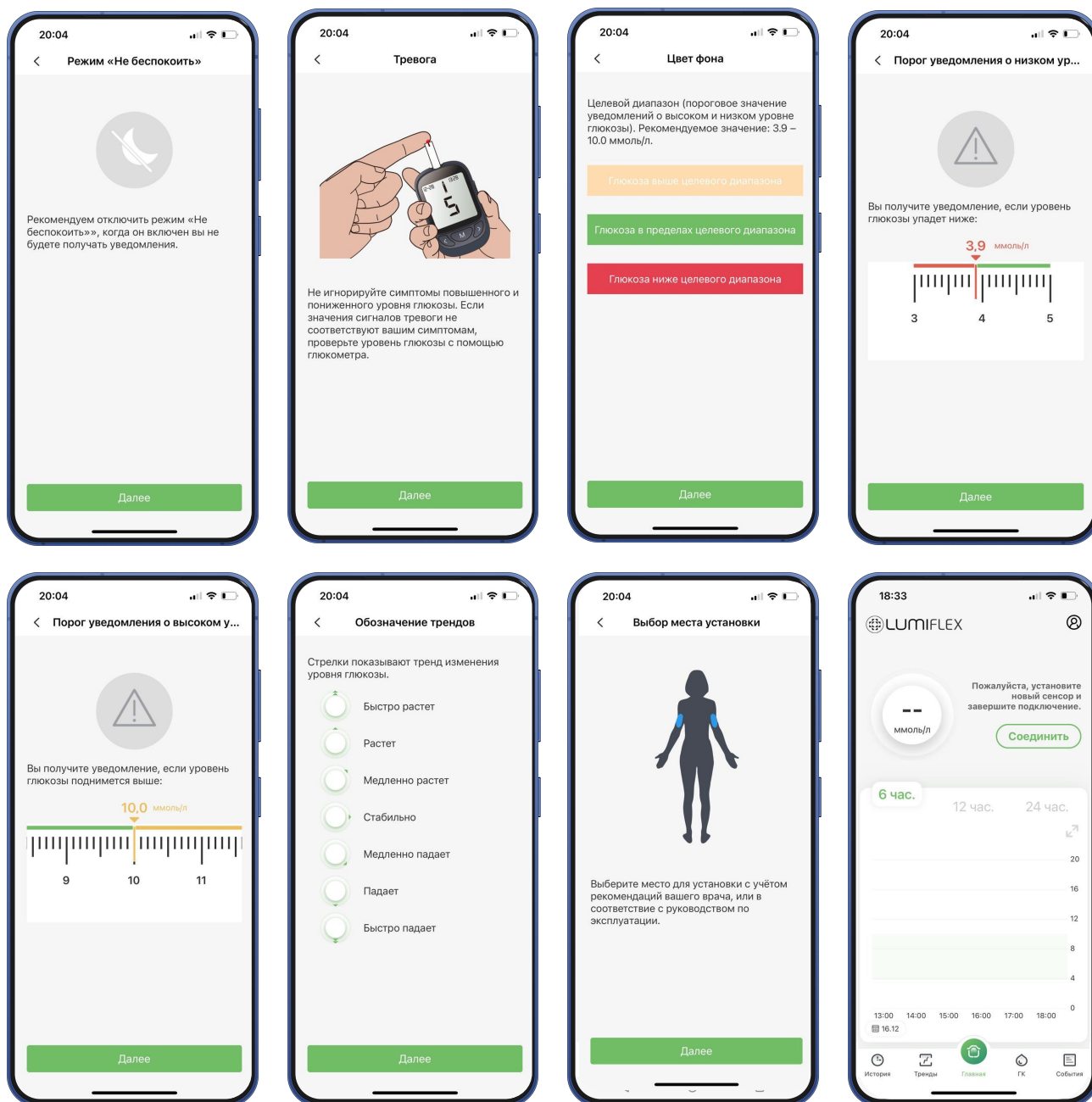

6. Финальный экран — регистрация завершена. Теперь можно переходить к установке сенсора Люмифлекс Linx.

Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



help@lumiflex.ru